

Vård- och omsorg

Ansvarig

Helen Hansson Malmgren
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Upprättad den

Ange datum.

Upprättad av

Helen Hansson Malmgren
Susanne Häger, arbetsterapeut
Sofie Rahdevi, fysioterapeut

Reviderad den

2024-11-20

Rutin för användning av akutlyft

Behov av att använda en lyft kan uppstå akut. Finns arbetsterapeut och/eller fysioterapeut i tjänst ska de kontaktas i första hand för ordination av akutlyft. Är de inte anträffbara, exempelvis kvällar och helger kontaktas alltid sjuksköterska.

Har en akutlyft behövt användas ska arbetsterapeut eller fysioterapeut kontaktas närmast följande vardag för bedömning av fortsatta åtgärder.

Exempel på händelser där behov av akutlyft kan uppstå:

- en patient blir akut sämre och kan inte förflyttas som tidigare.
- en patient hamnar på golvet och går inte att förflytta manuellt.
- en lyft går sönder och patienten kan därför inte förflyttas med ordinarie lyft.

Akutlyft

På alla vård- och omsorgsboende finns akutlyft av olika modeller. Dessa lyftar används enbart på boendet.

För patienter i ordinärt boende finns akutlyftar att låna på servicehusen:

- ✓ Bäckgården i Skanör
- ✓ Postgården i Höllviken
- ✓ Almgården i Vellinge
- ✓ Månstorps ängar i Västra Ingelstad

Akutlyften till ordinärt boende ska vara av en modell som är möjlig att ta med sig i en vanlig personbil. För närvarande används ”Molift Smart 150” lyften som har en max last på 150 kg. Hopfälld rullas lyften som en vanlig väska på hjul. Vid transport kan den också delas i två delar för att ytterligare minska vikten och lättare lasta i bilen.

Till akutlyften används lyftsele märkt akutlyftsele.

Användning av akutlyft

- Det ska alltid vara två omvårdnadspersonal vid användning av akutlyft.
- Instruktionerna till akutlyften som medföljer lyften ska följas noga.
- Vid förflyttning med personlyft ska rullstol och säng vara låsta och lyftens hjul ska vara olåsta. Undantag är när lyft ska ske från golv då ska lyftens hjul vara låsta.
- **Applicera lyftsele.**
 1. Nederdelen placeras ner till svanskotan.
 2. Ta bendelarna under patientens lår och korsa bendelarna.
 3. Fäst de yttersta öglorna i lyftbågen.
 4. Gör ett provlyft.
- Efter användning ska omvårdnadspersonal ombesörja att selen tvättas, lyften spritas av och hjälpmedlen återlämnas. Har patienten en smitta ska rutin för smittade hjälpmedel följas.
- Förebyggande underhåll och besiktning av lyften ska ske 1gång/år av företag som Vellinge kommun har avtal med.