


## Att byta elektroder och batteri på Lifepak CR2

1. Ta först ur de gamla batteriet, sedan de gamla elektroderna. Stoppa sedan i de nya elektroderna och stäng locket, och stoppa sedan i de nya batteriet.



2. Vänta sedan på att ni hör 3 ljudsignaler från hjärtstartaren och att den börjar blinka grönt igen innan ni öppnar locket. Noga att hjärtstartaren börjar blinka grönt igen innan man öppnar locket annars finns en risk att batteriet drar ut i förtid.
3. Gör sedan ett manuellt självtest genom att öppna locket på hjärtstartaren och när ni hör ordet "Vuxenläge" håller ni in "barnknappen" samt "språknappen" samtidigt tills ni hör ljudmeddelandet.

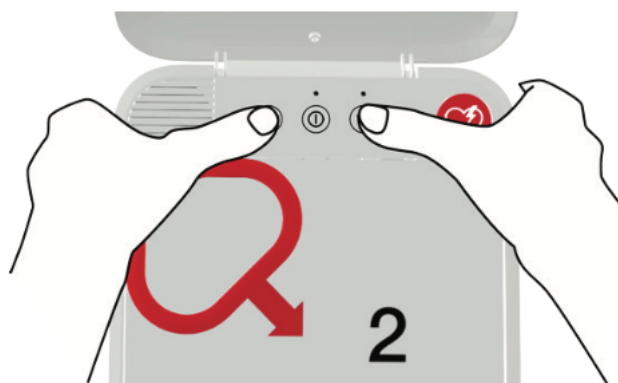

4. De gamla elektroderna sorteras som elavfall, och batteriet kastas bland vanliga batterier.
5. **Viktigt att komma ihåg:** När elektroder och batteri är bytt, kontrollera via erat LifeLink konto att ni även har den senaste programversionen i er hjärtstartare. Skulle detta missas så finns det risk att hjärtstartaren börjar varna efter en tid då den inte känner av de nya komponenterna, samt att batteriet även där kan dra ut i förtid. Logga in på erat LifeLink konto och titta under fliken Utrustning och sedan under Programvara och inställningsalternativ för att ev göra en uppdatering. Vid funderingar ta kontakt med er leverantör av hjärtstartare.