


## Instruktioner för Lättryckskalet

### Montering av larmenheten i lättryckskalet

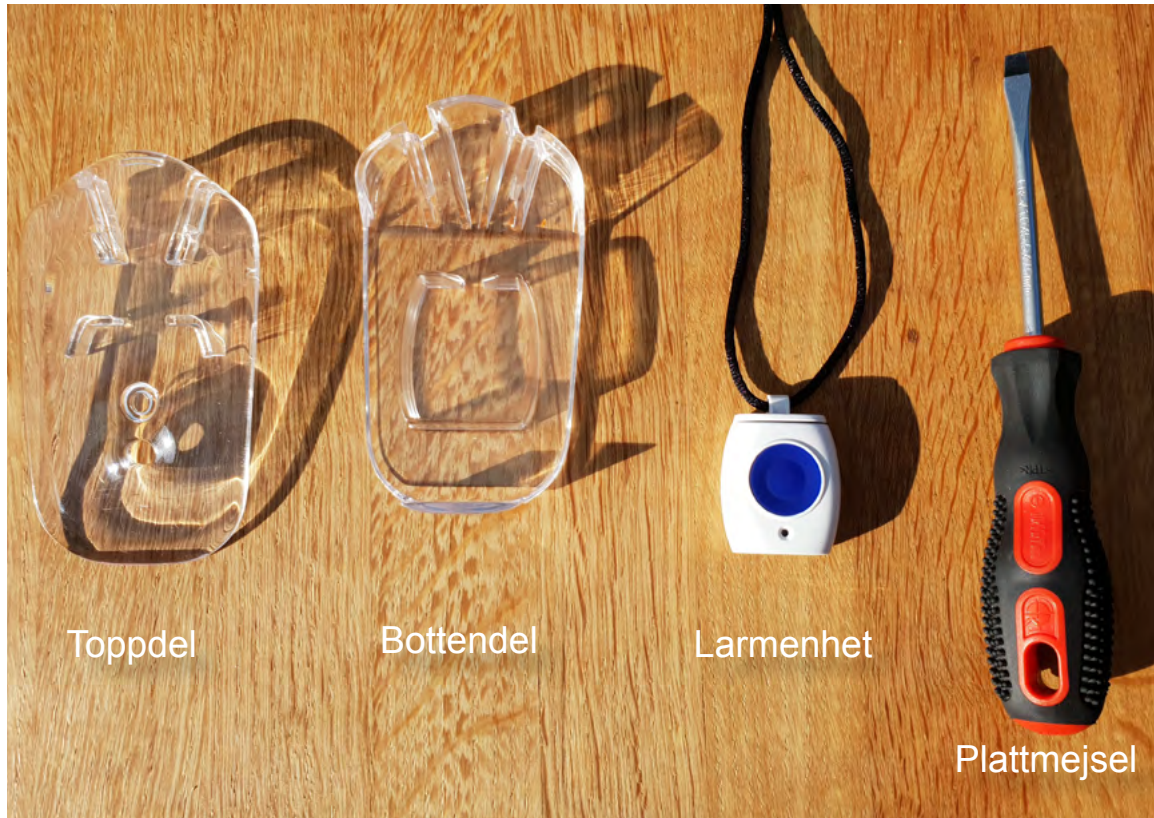


Lättryckskalet består av två delar, topp- och bottendel. Nedan visas på och avmontering av trygghetslarmet.



1. Placera in larm enheten i bottendelen. OBS! Se till att LED-ljuset sitter som på bilden (pekar neråt).

Kan förekomma att bandhållaren sitter på samma sida som LED-ljuset, byt plats på bandhållaren.

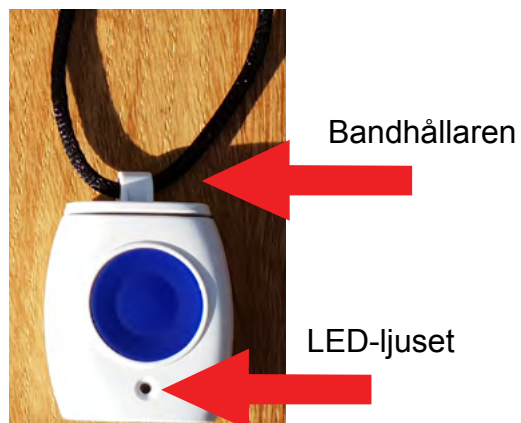



2. Tryck ner larm enheten hela vägen ner.




3a. Lägg toppdelen på bottendelen som på bilderna (delarna ska ej sitta rakt ovanpå varandra, se nedan bild).





3b. Sista momentet är att toppdelen ska klickas in med bottendelen, genom att lätt trycka ihop delarna från vars ett håll (se pilarna på bilden).

Du kan använda en hård yta (ex. bord) som motkraft (stöd) samtidigt som du håller delarna lätt ihopa (vänster hand) sedan trycker ner toppdelen (högra tummen). Du bör känna ett stadigt snäppe/klick ljud.

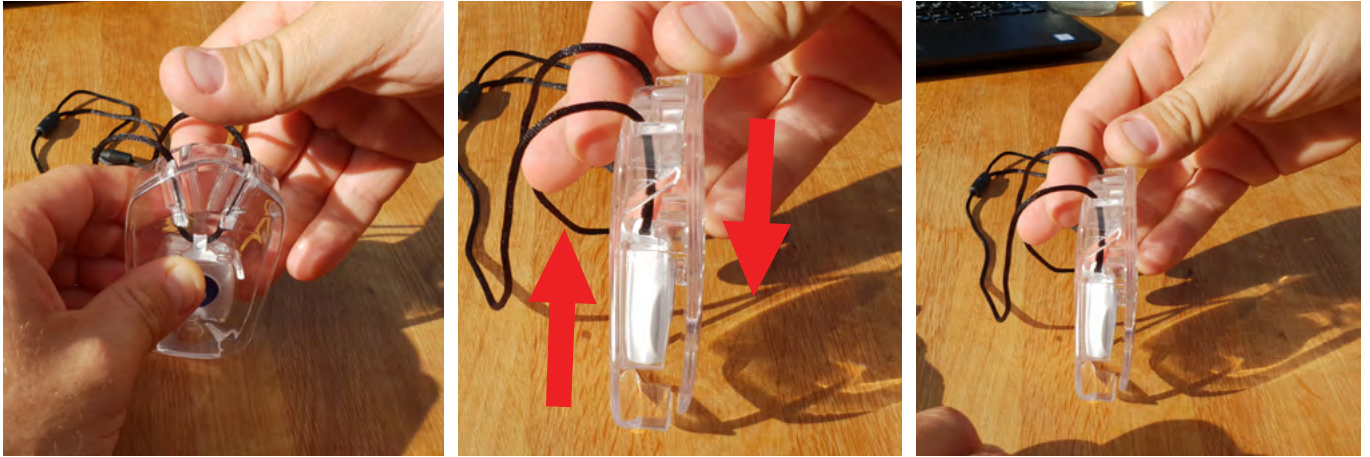

Tryck ner toppdelen!




Färdigt!


## Avmontering av larmenheten i lätttryckskalet (vid byte av larmenhet)




Verktyg: Använd ett plattmejsel.  
1. För in den mellan toppdel och botten-  
del (se bilder). Tryck in mejseln  
samtidigt som du vrider den åt sidan.  
På så sätt tvingar du av snäppet som  
sitter hårt. (Om nödvändigt gör  
samma sak på det andra snäppet.)

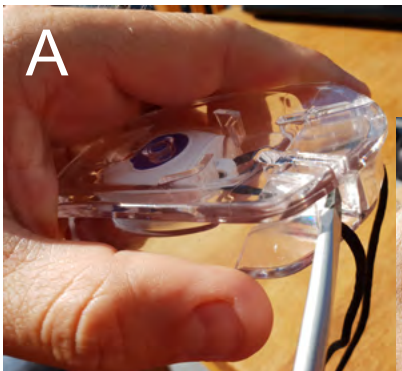

Tryck ut!

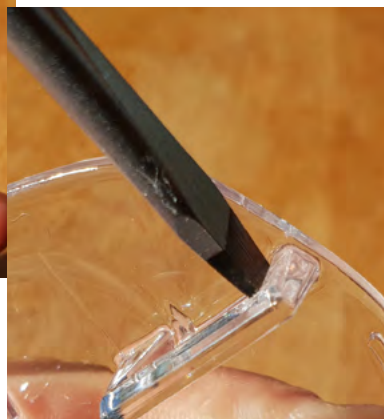


*Snäppen har en kant som plattmejseln  
kan vila på. Läggs mejseln på denna  
yta för mer egnomisk avmontering.*

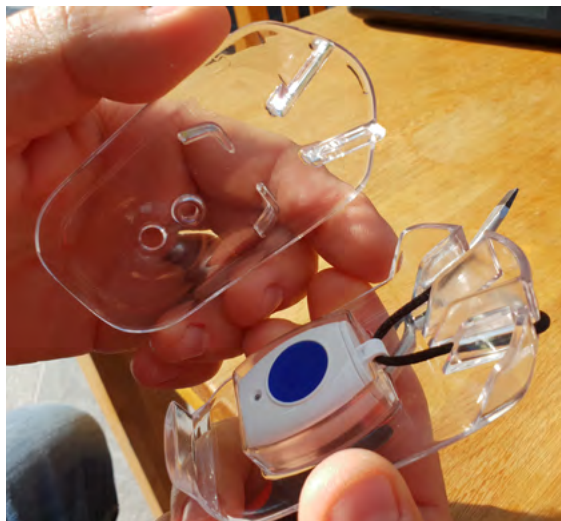

2. Nu bör du enkelt kunna öppna isär topp- och bottendelen.

3. Dra ut larmenheten m.h.a. bandet och byt ut larmenheten till en ny.

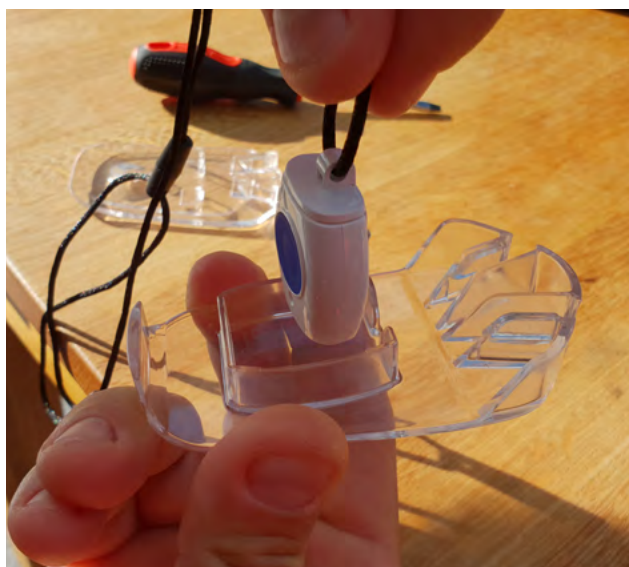

Upprepa monteringsanvisningarna för montering av det nya larmenheten.

